

# ModelPlace – Pflege- & Anwendungshinweise

## Materialinformation

Die Modellaufnahme-Platten bestehen aus hochwertigem ABS-Kunststoff. ABS wurde bewusst gewählt, da es sehr formstabil, stoß- und schlagfest sowie hitzebeständig ist.

Trotz der hohen Belastbarkeit handelt es sich um einen technischen Kunststoff, der sachgemäß behandelt werden sollte.

## Umgang mit Hitze

- Nicht aus nächster Nähe mit dem Abdampfer behandeln
- Keine punktuelle, direkte Hitzeeinwirkung
- Dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

## Chemikalienkontakt vermeiden

- Kein Kontakt mit Monomer
- Kein Kontakt mit Sekundenkleber (Cyanacrylat)
- Keine aggressiven Lösungsmittel oder stark chemisch aktive Substanzen

## Wichtiger Hinweis beim Schütten & Abdampfen

Vor dem Schütten von Prothesen, Abdampfen oder intensiven Reinigungsprozessen muss das 3D-gedruckte Modell immer von der Modellaufnahme-Platte gelöst werden. Erst nach Abschluss der Arbeiten wird das Modell wieder in den Artikulator eingesetzt.

Dies schützt Aufnahmeplatte, Magnet- und Passflächen sowie die Maßhaltigkeit des Systems.

## Hinweis zu den schwarzen Positionierungs-Pins

Die drei schwarzen Pins dienen der exakten Positionierung.

Sollte sich ein Pin lösen, kann er bei Bedarf mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber wieder eingesetzt werden.

Bitte nur punktuell fixieren, sodass der Pin bei Bedarf wieder entnommen werden kann.

Die Pins sind bewusst steckbar konstruiert, um bei Beschädigung (z. B. durch Anfräsen) einfach ersetzt werden zu können.

Daher sind sie als Ersatzteil erhältlich.

## Reinigung

- Mit mildem Reinigungsmittel und Wasser säubern
- Keine aggressiven Reiniger verwenden
- Nicht im Ultraschallbad reinigen

## Gewährleistung & Hinweise

Weitere Informationen zu Gewährleistung und Qualität finden Sie unter:

<https://www.shaper-place-thiele.de/kontakt/gewaehrleistungsbestimmungen>

**Bitte beachten Sie:**

**Die Garantie deckt Defekte am Produkt ab, jedoch keinen Verlust von Einzelteilen.**